

WHILL Model F ご利用案内



遅く 電源 速く



ホーン

左右に曲がる 後進



※前後左右に倒して操作します。
※手を離すと止まります。

1 乗降



必ず**電源OFF**で乗降ください。
着座後、電源ボタンを押してください。

2 速度設定



最初に速度が表示されます(1-4段階)。
最初は必ず「1」で操作に
慣れてください。

3 バッテリー



次にバッテリー残量(%)が
表示されます。
残量が少なくなりましたら返却
をお願いいたします。

4 手押し方法



利用中、バッテリーが切れた場合、
狭い場所で操作に不安がある場合は、
手動で赤いストッパー(左右)を下げ、
手押しでお戻りください。

5 ロック方法



利用中に機体から離れる際は、
スマートキーでロックしてください。
※スマートキー貸出が無い場合は電源OFF

6 返却



貸出終了時間までに必ずご返却を
お願いいたします。